

Des solutions personnalisées pour la cœlioscopie



Champs de cœlioscopie **BARRIER®** avec jambières

- Champ tout-en-un offrant des caractéristiques permettant une mise en place rapide et efficace par une seule personne afin de gagner du temps et de réduire le risque de contamination
- Bords adhésifs extensibles BARRIER® Flex, pour une excellente étanchéité dans le cadre d'un pneumopéritoine
- Poches et passe-tubulures intégrés, pour organiser la zone de travail
- Fenêtre périnéale avec cache intégré
- Adhésif intégré, pour ajuster la longueur de la jambière
- Matériaux totalement imperméables garantissant une sécurité optimale pour le patient

Instructions de drapage



1. Pour commencer, vérifiez la direction indiquée par le pictogramme sur le champ de coelioscopie. Retirez le papier protecteur.



2. Posez le champ sur le patient, en le centrant. Dépliez-le, d'abord vers vous puis dans l'autre sens.



3. Appuyez doucement pour faire coller l'adhésif.



4. Vérifiez le pictogramme au niveau du pied. Dépliez le champ sur la jambe en tirant sur le coin de la jambière. Faites de même sur l'autre jambe.



5. Utilisez l'adhésif intégré pour ajuster la longueur de la jambière et fixer le champ.



6. Dépliez le champ vers la tête du patient.



7. Le champ est en place.

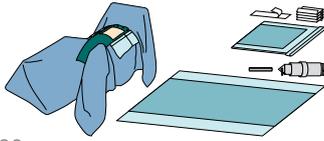


8. Servez-vous des poches et passe-tubulures intégrés pour organiser la zone de travail.

Scannez le code QR pour en savoir plus sur Mölnlycke ou visionner les vidéos d'instructions.



Réf.	Composants ProcedurePak
944205	Champ de coelioscopie 250/175/270 x 260 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm

Réf.	Codes stériles	Conditionnement
694245	1 housse de Mayo 79 x 145 cm, renfort 65 x 85 cm 4 cellduk 18 x 25 cm 1 OP-tape 9 x 49 cm 1 passe-tubulures 2,5 x 30 cm, adhésive 1 housse de caméra 14 x 250 cm, embout perforé 1 champ de coelioscopie 250/175/270 x 260 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm 1 champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm	5/10 
84511411	2 OP-tape 9 x 49 cm 1 champ de coelioscopie 250/175/270 x 260 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm 1 champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm	5/10 

Tous ces composants peuvent également être inclus dans les trousse ProcedurePak®

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique

Tél: +32 (0) 3-286 89 50. Fax: +32 (0)-286 89 52

Le nom et le logo Mölnlycke Health Care, BARRIER®, ProcedurePak®, Safetac® et Biogel® sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care. © 2016 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00391601)

