



Mölnlycke®

Trousse Universelle – BARRIER® Flex

Drapage du cou

- Bords adhésifs flexibles et confortables, permettant un drapage efficace sur tous les contours du corps
- Bords adhésifs étirables pour maintenir une étanchéité sûre même lorsque le corps est déplacé ou tourné
- L'adhésif offre une étanchéité sûre et résistante lorsqu'il est en contact avec des fluides
- Trois papiers release sur le bord du champ permettent de choisir entre une adhérence sur toute la longueur ou juste sur une partie
- Absorption efficace pour une zone de travail maintenue au sec
- Uniquement disponible chez Mölnlycke Health Care



Mieux vaut une solution intelligente que rapide


Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care sont conçus pour assurer une combinaison optimale entre protection, fonctionnalité et confort. L'assortiment de solutions innovantes et ciblées fournit des produits de qualité qui agissent en faveur de la sécurité. En outre, notre équipe d'experts vous offre un accompagnement sur le plan de la livraison et de la logistique et vous assiste au travers d'une formation permanente. Tout ceci se traduit par une économie de temps, d'efforts et d'argent. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le principal: traiter davantage de patients grâce à des soins plus efficaces.



Instructions



1 Enlevez la partie intermédiaire du papier release (n° 1) du champ adhésif. Si vous avez besoin de la longueur complète du bord adhésif, rétirez également les deux autres parties du papier release.

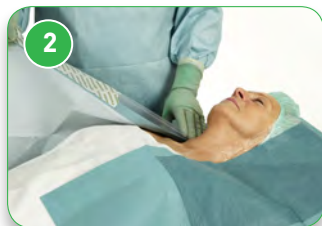

2 Fixez le champ adhésif au cou du patient, en commençant par la poitrine. Pour couvrir le côté opposé, commencez au sommet de la tête. Suivez les contours du corps, tout en maintenant le champ légèrement étiré.



3 Maintenez le champ adhésif (medium) dans le pli avec vos doigts. Enlevez la partie intermédiaire du papier release.



4 Disposez le champ adhésif plié au milieu du thorax.



5 Enlevez la reste du papier release et fixez les bords. Dépliez le champ vers la partie inférieure du corps.




6 Enlevez la partie intermédiaire du papier release. Disposez le champ adhésif plié (large) au milieu du menton du patient. Enlevez le reste du papier release et fixez les bords.



7 Dépliez le reste du champ adhésif vers la tête.

66010 Trousse Universelle - BARRIER Flex

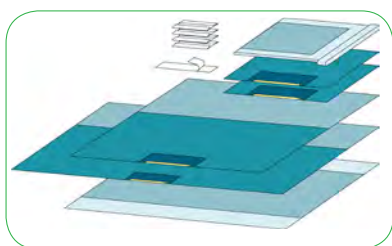

Quantité	Description
1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
2	Champs adhésifs 90x75cm
4	Cellduk 18x25cm
1	OP-tape 9x49cm
1	Champ adhésif 175x175cm
1	Champ adhésif 300x175cm
1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Champs opératoires BARRIER

- Matériaux 100% imperméables pour une sécurité optimale du patient
- Pliés de façon optimale et pour un emploi aseptique, utilisables par une seule personne en toute simplicité